

# SPARCHLOR

## Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos



### Propriedades e Utilizações

SPARCHLOR é um desinfetante hospitalar a base de Hipoclorito de Sódio, com 2% de cloro ativo (20.000 ppm), indicado para áreas críticas, tais como centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI, UTI Neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, etc., para áreas semicríticas, tais como enfermaria e apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de triagem, etc., e áreas não críticas, tais como almoxarifados, vestiários, áreas administrativas, etc.

SPARCHLOR é indicado também para laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e odontológicas, podendo ser utilizado em superfícies fixas, tais como pisos, paredes, bancadas, tetos, louças sanitárias e macas, artigos não críticos, tais como suporte de soro, comadres, papagaios, bacias, cuba rim e cadeiras de banho, bem como, área de lactários, para a desinfecção de mamadeiras, bico de mamadeiras, chupetas, entre outros utensílios.

SPARCHLOR atua em um amplo espectro de bactérias gram-positivas e gram-negativas, entre elas Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Ele desinfeta, desodoriza e alveja em uma única operação, proporcionando alta performance e economia em cada aplicação.

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

**Aparência:** Líquido Transparente

**Cor:** Esverdeada

**Odor:** Cloro

**pH:** 11,5–13,5

**Teor de Cloro Ativo:** 2,0–2,5%

#### COMPOSIÇÃO

Água, tensoativo não-iônico, acidificante e ativos

#### EMBALAGENS

2 x 5 Lts

#### PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N°

3.0018.0147



# SPARCHLOR

## Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos



### Instruções de Uso

#### Para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos:

1. Antes do procedimento de desinfecção, realizar a lavagem, utilizando detergente e efetuando ação mecânica para remoção das sujidades e/ou matéria orgânica impregnada (óleo, gordura, sangue, etc).
2. Diluir SPARCHLOR, na diluição de até 1:10 (2.000ppm) e aplicar sobre a superfície, deixando agir por 10 minutos.
3. Enxaguar.

Método	Diluições
Desinfecção de Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos	1:10 (100 mL por litro de água)

#### Para desinfecção em lactários:

1. Realizar lavagem prévia, utilizando detergente e efetuando ação mecânica. Enxaguar para remover todo residual do produto.
2. Em seguida, diluir SPARCHLOR, na diluição de até 1:40 (500ppm).
3. Realizar a imersão dos artigos na solução por 1 hora.
4. Enxaguar.

Método	Diluições
Desinfecção em Lactários	1:40 (25 mL por litro de água)

#### Recomendações Importantes

Nunca utilize SPARCHLOR em tecidos coloridos, carpetes, madeira, superfícies pintadas, superfícies de alumínio, fibra de vidro, mármore, superfícies metálicas e outras superfícies passíveis de oxidação e descoloração.

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

